

# Manual de Funcionamiento del Sistema BPAP Serie Y / U

## 1. Función de los Botones



Botón de Silenciar: Presionar para silenciar la alarma




Botón de Mando: Inicia el tratamiento y ajusta la configuración del dispositivo



Botón de Rampa: Presionar para activar la función de aumento

## 2. Configuración del Dispositivo

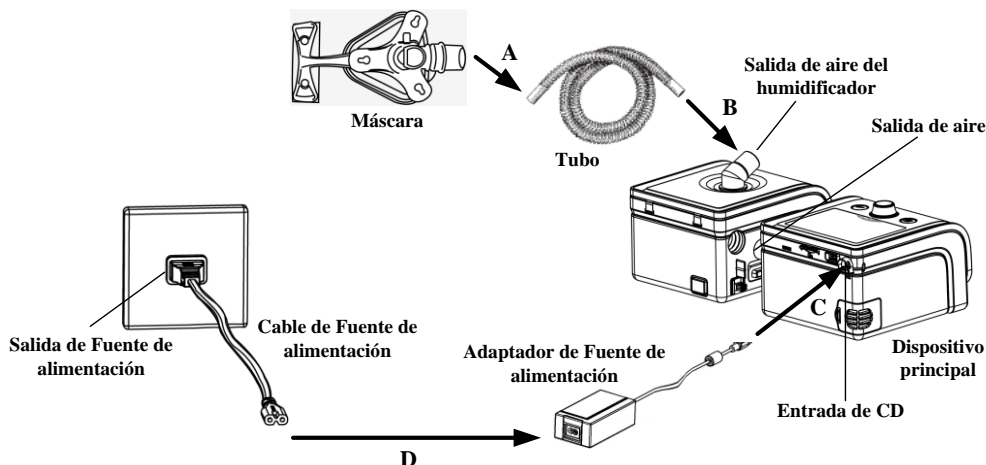

A. Conectar un extremo del tubo a la mascarilla ya montada.

B. Conectar el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo principal o del humidificador, tal como se muestra en la figura anterior.

C. Conecte el adaptador de fuente de alimentación a la entrada DC del dispositivo principal.

D. Conecte el cable de fuente de alimentación al adaptador de fuente de alimentación.

E. Conecte el cable de fuente de alimentación a la toma de corriente.


## 3. Ajustar la Configuración del Dispositivo

A. Después de que el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación, la pantalla muestra la interfaz principal que se muestra abajo en la figura de la izquierda, o a la interfaz principal mostrada abajo en la figura de la medio, o a la interfaz principal mostrada abajo en la figura de la derecha.


*Nota: El valor de saturación de oxígeno de la sangre ( $SpO_2$ ) y la frecuencia del pulso sólo puede ser visto después de que el Kit de  $SpO_2$  está conectado al dispositivo principal correctamente.*



La interfaz anterior sólo se aplica a U-20T, U-25T, U-30T, U-30AT.

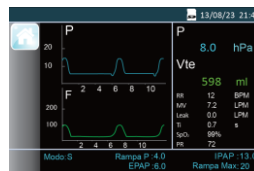

La interfaz anterior sólo se aplica a Y-20T, Y-25T, Y-30T, Y-30AT.

B. Desde la interfaz principal que se muestra arriba, presione y mantenga presionado el **Botón de Rampa**  durante tres segundos. La pantalla muestra la interfaz de configuración inicial, como se muestra en la siguiente figura.



C. Presione el **Botón de Mando** para acceder a la interfaz de configuración, como se muestra en la siguiente figura.




D. Presione y gire el **Botón de Mando** para ajustar una opción.



E. Presione el **Botón de Mando** para confirmar su ajuste a la opción.



F. El cursor cambia entre las opciones a medida que se gira el **Botón de Mando**. Consulte los pasos C-E para ajustar otras opciones. Cuando el cursor esté sobre la opción de inicio, como se muestra en la figura a continuación, pulse el **Botón de Mando** para salir de la interfaz de configuración.

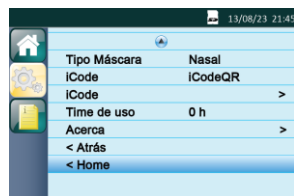

#### 4. Iniciar el Tratamiento

Después de terminar de ajustar la configuración del dispositivo y volver a la interfaz principal, pulse el **Botón de Mando** para iniciar el tratamiento.

#### 5. Consejos Importantes

Por favor, consulte el manual del usuario para obtener información sobre el uso del Kit de SpO<sub>2</sub> y de la tarjeta SD.

Antes de usar el dispositivo, lea el manual del usuario y memorice toda la información necesaria para asegurarse de usar adecuadamente el dispositivo.