


Manual de Funcionamiento del Serie G2S BPAP

1. Función de los Botones

-  Botón de Rampa: Presionar para activar la función de aumento
-  Botón de Silenciar: Presionar para silenciar la alarma
-  Botón de Mando: Inicia el tratamiento y ajusta la configuración del dispositivo

2. Configuración del Dispositivo

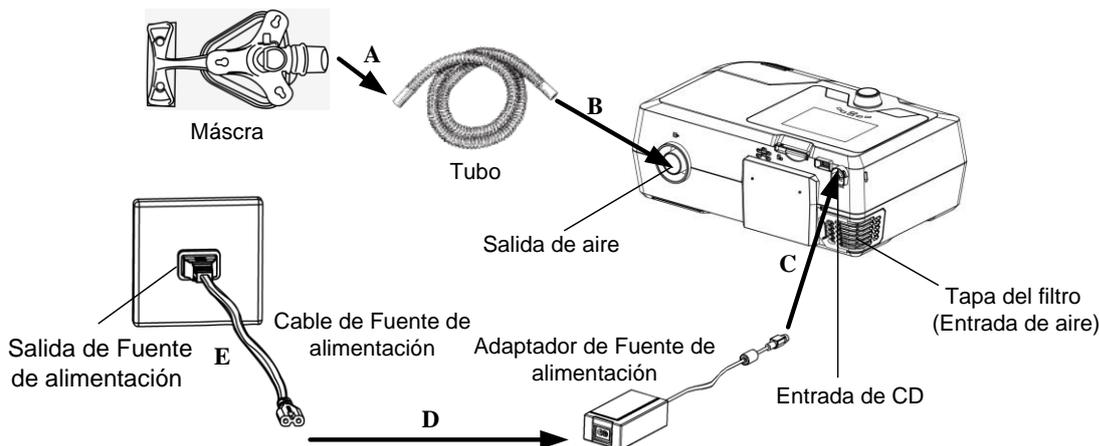

- A. Conectar un extremo del tubo a la mascarilla ya montada.
- B. Conectar el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo, tal como se muestra en la figura anterior.
- C. Conecte el adaptador de fuente de alimentación a la entrada DC del dispositivo principal.
- D. Conecte el cable de fuente de alimentación al adaptador de fuente de alimentación.
- E. Conecte el cable de fuente de alimentación a la toma de corriente.


3. Ajustar la Configuración del Dispositivo

A. Después de que el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación, la pantalla muestra la interfaz principal que se muestra abajo en la figura de la primera, o a la interfaz principal mostrada abajo en la figura de la segundo, o a la interfaz principal mostrada abajo en la figura de la tercero, o a la interfaz principal mostrada abajo en la figura de la cuarto .

Nota: El valor de saturación de oxígeno de la sangre (SpO₂) y la frecuencia del pulso sólo puede ser visto después de que el Kit de SpO₂ está conectado al dispositivo principal correctamente.




La interfaz anterior sólo se aplica para a G2S B20S, G2S B20A.

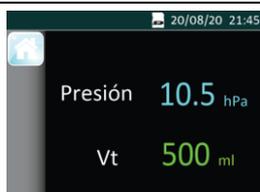

La interfaz anterior sólo se aplica a G2S B20T.



La interfaz anterior sólo se aplica para a G2S B25A, G2S B25S.

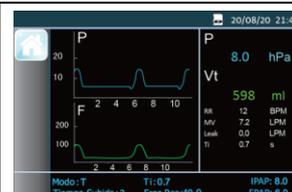

La interfaz anterior sólo se aplica a G2S B25T, G2S B25VT, G2S B30T, G2S B30VT, G2S B30AT, G2S LAB.

B. Desde la interfaz principal que se muestra arriba, presione y mantenga presionado **el Botón de Rampa**  durante tres segundos. La pantalla muestra la interfaz de configuración inicial, como se muestra en la siguiente figura.



C. Presione **el Botón de Mando**  para acceder a la interfaz de configuración, como se muestra en la siguiente figura.



D. Presione y gire **el Botón de Mando**  para ajustar una opción.



E. Presione **el Botón de Mando**  para confirmar su ajuste a la opción.



F. El cursor cambia entre las opciones a medida que se gira **el Botón de Mando**  Consulte los pasos C-E para ajustar otras opciones. Cuando el cursor esté sobre la opción de inicio, como se muestra en la figura a continuación, pulse **el Botón de Mando**  para salir de la interfaz de configuración.



4. Iniciar el Tratamiento

Después de terminar de ajustar la configuración del dispositivo y volver a la interfaz principal, pulse **el Botón de Mando**  para iniciar el tratamiento.