





# Manual de Funcionamiento del G3 BPAP Series

## 1. Función de los Botones


-  Botón de Hogar: Volver al menú anterior o la interfaz principal.
-  Perilla: Ajusta la configuración del dispositivo.
-  Botón de Inicio / Parada: Iniciar / detener la entrega de aire.


## 2. Configuración del Dispositivo

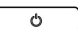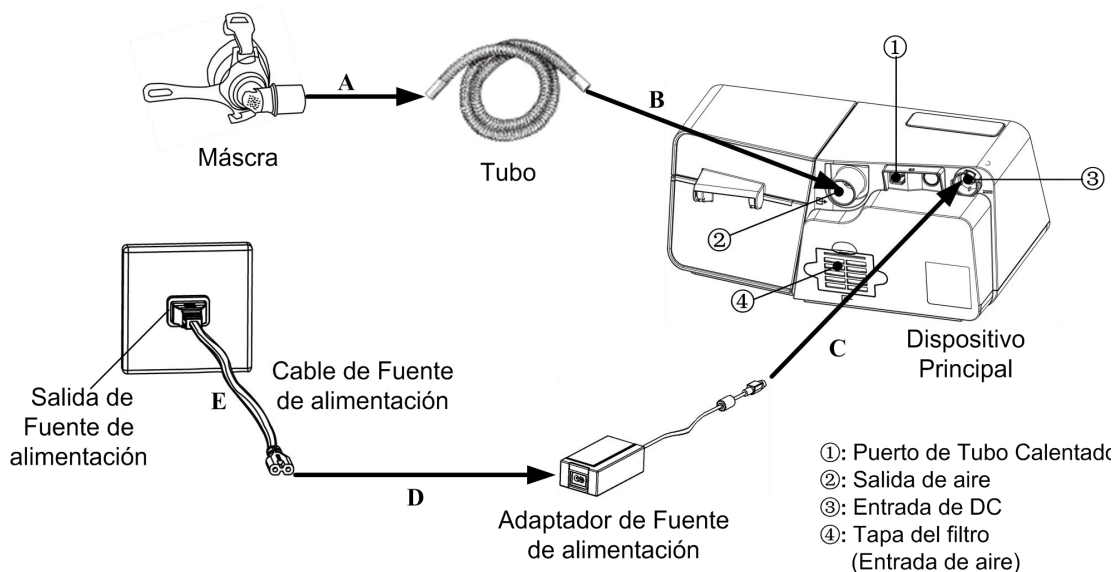


- A. Conectar un extremo del tubo a la mascarilla ya montada.
- B. Conectar el otro extremo del tubo de forma segura a la salida de aire del dispositivo, tal como se muestra en la figura anterior. Conecte la unión del tubo calentado a la salida de aire del dispositivo, y luego inserte el enchufe de alimentación en el puerto del tubo calentado en la parte posterior del dispositivo.
- C. Conecte el adaptador de fuente de alimentación a la entrada DC del dispositivo principal.
- D. Conecte el cable de fuente de alimentación al adaptador de fuente de alimentación.
- E. Conecte el cable de fuente de alimentación a la toma de corriente.

## 3. Ajustar la Configuración del Dispositivo

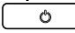A. Conecte el cable de alimentación y el adaptador de alimentación correctamente. La pantalla muestra la interfaz principal que se muestra en la figura a la izquierda a continuación, presione el **botón de Inicio/Parada** , y el dispositivo comenzará a suministrar aire, la pantalla muestra la interfaz principal que se muestra en la figura de abajo (aplicable a G3 B20A, G3 B25S, G3 B25A modelos) o como se muestra en la figura a continuación (aplicable a G3 B25VT, G3 B30VT, G3 B30SV, G3 LAB modelos).

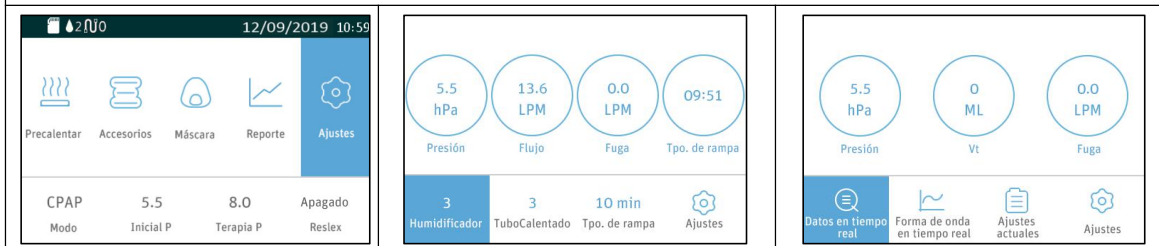

B. Gire la **Perilla**  para acceder a la interfaz de configuración inicial del menú del paciente, como se muestra en la figura a la izquierda a continuación. La opción de **Tubería Calentada** solo se puede ajustar cuando el dispositivo está conectado al tubo calentado, como se muestra en la siguiente figura.




C. Presione la **Perilla**  para acceder a la Interfaz de Configuración, como se muestra en la siguiente figura.





D. Gire la **Perilla**  para ajustar una opción.




E. Presione la **Perilla**  para confirmar su ajuste a la opción.



F. El cursor cambia entre las opciones a medida que se gira la **Perilla** , como se muestra en la siguiente figura. Consulte los pasos C-E para ajustar otras opciones. Presione el **Botón de Hogar**  para salir de la Interfaz de Configuración.






#### 4. Iniciar el Tratamiento

Después de terminar de ajustar la configuración del dispositivo y volver a la Interfaz Principal, presione el **Botón de Inicio / Parada**  para iniciar el tratamiento.

## 5. Puntuación de uso de G3 BPAP Series

Después de cada tratamiento, G3 BPAP Series proporcionará una puntuación de uso (solo para el modo CPAP y AutoCPAP) y un resumen de uso en la pantalla para que el usuario comprenda rápidamente el uso del día reciente (a partir de las 12:00 del mediodía). del día anterior a las 12:00 del mediodía del día)

La puntuación total es de 100 puntos, con el siguiente desglose:

Puntaje total	Estado	Monitor
$\geq 75$	Bueno	
55 - 74	Aceptable	
$\leq 54$	Necesita mejorar	

### Tiempo usado (60 puntos)

Cuanto más tiempo de tratamiento recibe el usuario, más puntos obtiene el usuario. Si el dispositivo se usa durante 30 minutos, obtenga 5 puntos, o durante 1 hora, obtenga 10 puntos. El usuario puede obtener hasta 60 puntos.

Tiempo usado (min)	$\geq 360$	330-359	300-329	...	60-89	30-59	0-29
Puntaje	60	55	50	...	10	5	0

### Sello de máscara (20 puntos)

Si el usuario lleva bien la mascarilla sin fugas adicionales durante el tratamiento, el usuario puede obtener hasta 20 puntos. Si la fuga promedio es inferior a 10 L/min, obtiene 20 puntos y se deducirán 5 puntos por cada aumento de fuga de 5 L/min.

Fuga (L/min)	<10	10-14	15-19	20-24	$\geq 25$
Puntaje	20	15	10	5	0

### Eventos respiratorios (10 puntos)

Cuanto menor sea el número de episodios respiratorios (apneas e hipopneas), mayor será la puntuación.

Si el IAH es menor de 5, obtiene 10 puntos, cuando el IAH es  $\geq 5$  y por cada aumento de 5 en el IAH, se deducen 2 puntos.

IAH	<5	5-9	10-14	15-19	20-24	$\geq 25$
Puntaje	10	8	6	4	2	0