



Mask

F2 NV Full Face Mask (F2 NV1/F2 NV2)

Manual del Usuario

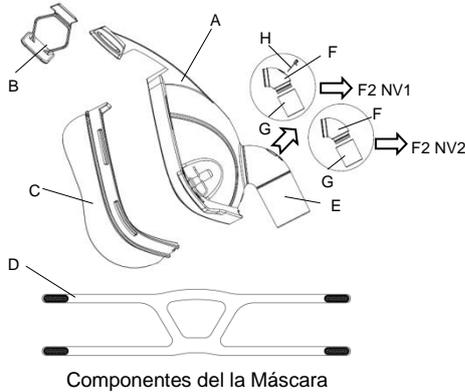

Componentes del la Máscara

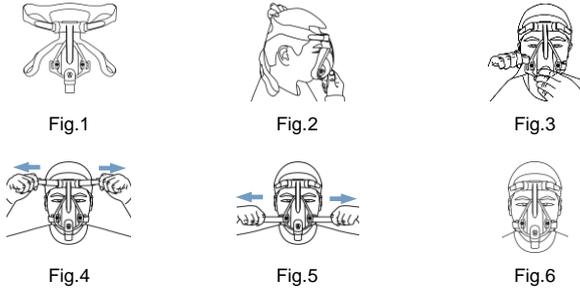

Ajustar la máscara

F2 NV Full Face Mask (F2 NV1/F2 NV2)

Gracias por elegir la F2 NV Full Face Mask (F2 NV1/F2 NV2) de BMC. La serie de F2 NV tiene dos modelos: F2 NV1 y F2 NV2, que son máscaras sin ventilación. La serie de F2 NV tiene una hembra normal cónica de 22 mm que se ajusta a la conexión externa del ventilador. F2 NV1 incluye una válvula de anti-asfixia que es diseñada para asegurar de que el paciente pueda respirar cuando el dispositivo de terapia tenga una falla. F2 NV2 es diseñada sin válvula de anti-asfixia. Este manual le proporciona la información completa que necesite para el uso adecuado de las máscaras F2 NV. La Máscara No está hecha con latex natural.

Uso previsto

La máscara es diseñada para ser usada con el sistema de ventilador con válvula activa de escape, para ofrecer asistencia respiratoria a los pacientes con insuficiencia y falta respiratoria.

- La máscara es aplicable a los pacientes adultos (> 30 kg) que necesiten asistencia de un ventilador sin soporte vital.
- La máscara se usa por paciente único, durante siete días al máximo, en el ambiente de hospital o clínica.

Antes de utilizar la máscara

⚠ ADVERTENCIAS

- No debe usarse la máscara a menos que el sistema del ventilador esté encendido y funcione correctamente.
- No aplicable para usuarios de alergia a la silicona.
- No se debería utilizar esta máscara en pacientes que son poco colaboradores, insensibles, con dificultades para responder o que presentan problemas para quitarse la máscara.
- Para minimizar el riesgo de vómitos durante el sueño, el paciente debe evitar comer o beber durante las tres horas antes de ponerse la máscara. No se recomienda esta máscara si el paciente está tomando medicamentos bajo receta que pueden provocar vómitos.
- Siga todas las precauciones al administrar el oxígeno suplementario.
- El flujo de oxígeno debe apagarse cuando el generador de aire no está en funcionamiento, de forma que el oxígeno sin utilizar no se acumule dentro del recinto del generador de aire, provocando el riesgo de incendio.
- Con valores fijos del flujo de oxígeno suplementario, la concentración de oxígeno varía, dependiendo de la presión configurada, el patrón de

respiración del paciente, la máscara, el punto de aplicación y el índice de fugas.

- Las especificaciones técnicas de la máscara son proporcionadas por su médico, para que puede comprobar si es compatible con el generador de aire. Si se utiliza el equipo más allá de las especificaciones técnicas o con dispositivos no compatibles, es posible que el sellado y la comodidad de la máscara no sean idóneos, no se logrará una terapia óptima, pueden existir fugas o el índice de fugas puede verse alterado, lo cual puede afectar la función del generador de aire.
- Deje de utilizar la F2 NV Full Face Mask (F2 NV1/F2 NV2) y consulte a su médico o especialista del sueño si tiene CUALQUIER reacción adversa al utilizar la máscara.
- Consulte el manual de su generador de aire para más información sobre su configuración y operación.
- Retire todos los embalajes antes de usar la máscara.
- Las imágenes aquí mostradas son sólo indicativas. Si existe incongruencia entre la imagen y el producto real, el producto real prevalecerá.

Componentes del la Máscara

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| A. Instalación del marco | E. Elbow assembly |
| B. Cojinete de la frente | F. Junta giratoria |
| C. Almohadilla | G. Codo |
| D. Arnés | H. Válvula |

Ajustar la máscara

Consejos de montaje:

1. Como el esquema indica, introduzca la parte de arriba de la arnés en el agujero de la máscara y adhiérala. Doble y adhiera la parte de abajo. (Fig.1)
2. Presione la máscara en la cara y tire la arnés encima de la cabeza. Por favor asegure que la etiqueta de la arnés da hacia afuera cuando la arnés está bien colocada. (Fig.2)
3. Saque la parte de abajo de la arnés bajo la oreja, la rodee por la cara y la introduzca en el gancho fijo en la parte de abajo de la máscara. (Fig.3)
4. Al mismo tiempo extienda la parte de arriba de la arnés como el esquema hasta que la máscara se encuentre bien colocada. Después adhiera bien la arnés. (Fig.4)
5. Al mismo tiempo extienda la parte de abajo de la arnés como el esquema hasta que la máscara se encuentre bien colocada. Después adhiera bien la arnés. (Fig.5)
6. Prenda el equipo y empieza a suministrar el oxígeno. Conecte el tubo de respiración con la conexión del tubo torcido. Ajuste la máscara para evitar que escape el oxígeno. (Fig.6)

⚠ PRECAUCIONES

- El juego del elbow assembly no se puede deshacer del instalación del marco.
- El juego del elbow assembly mismo no se puede deshacer.
- La válvula de F2 NV1 no se puede deshacer. Una vez deshecha, se romperá fácilmente y es difícil reinstalarla.

Limpiar la máscara

Esta máscara es desechable y debe desecharse si está muy sucia. Si está un poco sucia la máscara puede limpiarse con un hisopo de alcohol isopropílico de 70% v/v. No desmonte la máscara.

Especificaciones técnicas

Información sobre el espacio muerto	El espacio muerto es el volumen vacío de la máscara hasta la junta giratoria. El espacio muerto de la máscara varía según los tamaños de las almohadillas, pero en todo caso es menor de 218 ml.
Presión terapéutica	3 a 40 cmH ₂ O
Resistencia	Caída de presión medida (promedio de 3 tallas) a 50 L/min: 0,15 cmH ₂ O a 100 L/min: 0,5 cmH ₂ O
válvula de anti-asfixia cerrada a la atmósfera (F2 NV1)	1,2 cmH ₂ O
válvula de anti-asfixia abierta a la atmósfera (F2 NV1)	1,0 cmH ₂ O
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento: +5°C a +40°C (41°F a 104°F) Humedad de funcionamiento: 0% ~ 93% humedad relativa, sin condensación Almacenamiento y transporte: -20°C a +55°C (-4°F a 131°F) Humedad de almacenamiento y transporte: 0% ~ 93% humedad relativa, sin condensación

Notas:

1. F2 NV2 no tiene válvula de anti-asfixia.
2. Este producto no está hecho por látex de caucho natural, PVC o phthalates, tales como DEHP, DBP o BBP.

Almacenamiento

Asegúrese de que la máscara esté limpia y seca antes de guardarla durante cualquier periodo de tiempo. Guarde la máscara en un lugar seco fuera de la luz solar directa.

Eliminación

Desecha según las regulaciones locales.

Símbolos

Sistema y Embalaje



Precaución, consulte la documentación adjunta.

Indica una advertencia o una precaución y le avisa de una posible lesión o le describe medidas especiales para el uso seguro y eficaz del dispositivo.



Número de lote



Número del catálogo



Límite de temperatura



Límite de humedad



Fabricante



Autorizado por representantes de la Comunidad Europea



Un Solo Uso

FÁBRICANTE:

BMC MEDICAL CO., LTD.

Salón 110 Torre A Edificio Fengyu, No. 115 Carretera Fucheng, Haidian, Beijing 100036, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

URL : en.bmc-medical.com
E-mail : intl@bmc-medical.com
Teléfono : +86-10-51663880
Fax : +86-10-51663880 Ext. 810

REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA UE:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburgo, Alemania

Teléfono : 0049-40-2513175
Fax : 0049-40-255726

Sitio de fabricación:

BMC (Tianjin) Medical Co., Ltd.

2/F Área Norte y 3/F, Edificio No.4, No.1 Xinxing Road, Distrito de Wuqing, (301700) Tianjin, RP China

Teléfono : + 86-22-82939881